

ÆLITEFLO™

низькомодульний мікрогібридний композит

ÆLITEFLO — це світлотвердіючий, високонасичений мікрогібридний композит із низьким модулем еластичності. Незважаючи на те, що ÆLITEFLO є текучим композитом, його фізичні властивості запобігають сповзанню матеріалу для кращого контролю у важкодоступних ділянках. Використовуйте додані наконечники для легкого введення ÆLITEFLO безпосередньо в препаровану порожнину.

Модуль еластичності дентину становить близько 18 ГПа, тоді як у ÆLITEFLO він становить <6 ГПа, що забезпечує більш еластичні характеристики. Така властивість еластичності забезпечує кращу фіксацію. Це особливо важливо при реставрації у пацієнтів із множинними абфракційними ураженнями, де використання високонасиченого жорсткого композиту в кінцевому підсумку призведе до невдачі.

Показання до застосування:

1. Клас V
2. Клас III
3. Реставрація щічної ямки
4. Невеликі порожнини IV Класу, що не несуть навантаження
5. Бондинг порцелянових вінірів
6. Профілактична смола для дорослих
7. Шинування — цементиція зуба до зуба
8. Формування невеликих кукс
9. Виправлення крайового дефекту
10. Молочні зуби (Клас I або Клас II)

Показання до застосування:

1. Лайнерна прокладка порожнини (Клас I або Клас II)
2. Герметизація ямок і фісур

Технічна інформація:

При кімнатній температурі (20°C / 68°F – 25°C / 77°F):

КОРИСНІ ПІДКАЗКИ

Незважаючи на те, що реставрація може виглядати гладкою та полірованою одразу після внесення та світлового затвердіння, на ній присутній інгібований киснем шар. Його необхідно видалити (фінішна обробка дисками та/або полірувальною пастою тощо) для запобігання фарбуванню.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ:

1. До ізоляції зуба підберіть відповідний відтінок ÆLITEFLO.
2. Зніміть ковпачок з обраного шприца та надійно закріпіть голку-наконечник (канюлю).
3. Переконайтеся, що порожнина належним чином очищена відповідно до інструкції з застосування адгезивної системи, яка використовується.
4. Нанесіть адгезив відповідно до інструкцій виробника.
5. Використовуючи попередньо обраний відтінок, вносьте композит у препаровану порожнину шарами по 1–2 мм. Для непрозорого білого відтінку (Oraque White) наносьте шарами по 1 мм.
6. Полімеризуйте світлом кожен шар протягом 20 секунд. Продовжуйте пошарово заповнювати порожнину, поки вона не буде заповнена до країв.
7. Переходьте до остаточної обробки та полірування.

Протипоказання: При випадковому потрапленні в око промийте великою кількістю води та негайно зверніться до лікаря. У разі контакту з іншими тканинами негайно промийте великою кількістю води протягом кількох хвилин.

Попередження: Продукт може містити компоненти, призначені для одноразового використання.

Гігієна: Якщо наконечник використовувався в порожнині рота, перед зберіганням протріть його дезінфікуючим засобом.

Запобіжні заходи: Уникайте контакту зі шкірою; не полімеризована (метил)акрилатна смола може викликати сенсibiliзацію (подразнення) шкіри у чутливих осіб. У разі контакту промийте шкіру водою з милом.

Перевіряйте етикетки окремих компонентів на наявність терміну придатності.