



Систему композитов AELITE Bisco™ составляют светоотверждаемые реставрационные материалы на основе смолы, обеспечивающие исключительную эстетику прямым реставрациям любого класса. Данная система разработана в целях удовлетворить требованиям и техники реставрации одним композитом и техники послойного нанесения нескольких оттенков композита.

Композиты AELITE предназначены для использования с такими адгезивными системами, как ALL-BOND® и ONE-STEP®.

Следуйте инструкциям производителя. Не все однобутылочные адгезивные системы обеспечивают бондинг с самоотверждающимися композитами и композитами двойного отверждения. В отличие от других систем, ONE-STEP и ONE-STEP PLUS обеспечивает прочное сцепление со всеми самоотверждающимися материалами и материалами двойного отверждения.

AELITE AESTHETIC ENAMEL - УСИЛЕННЫЙ КОМПОЗИТ-НАНОФИЛ

Aelite Aesthetic Enamel – это светоотверждаемый, флуоресцентный, высоконаполненный композит-нанофил. Усиленный химический состав позволяет использовать данный материал в качестве эмалевого слоя в прямых реставрациях любого класса. Наночастицы наполнителя обеспечивают Aelite Aesthetic Enamel отличную полируемость, а усиливающий наполнитель (70% - 75% по весу) - максимальную силу и прочность, предполагая более высокую концентрацию частиц.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МАТЕРИАЛА AELITE AESTHETIC ENAMEL:

- Эмалевый слой для реставраций I, II, III, IV, V классов
- Закрытие диастемы
- Прямые виниры
- Ремонт композитных и фарфоровых реставраций
- Периодонтическое шинирование.

AELITE ALL PURPOSE BODY - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГИБРИДНЫЙ КОМПОЗИТ

Aelite All Purpose Body - это светоотверждаемый рентгеноконтрастный универсальный гибридный композит. Aelite All Purpose Body разработан для создания гармонирующих с окружающим зубным рядом реставраций при самостоятельном использовании или использовании вместе с материалом Aelite Aesthetic Enamel в технике послойного нанесения.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МАТЕРИАЛА AELITE ALL PURPOSE BODY:

- Реставрации I, II, III, IV, V классов
- Прямые эстетичные виниры для маскировки пятен и аномалий
- Надстраивание культи в целях замещения отсутствующих зубных структур
- Ремонт композитных и фарфоровых реставраций
- Лингвальный слой в реставрациях передних зубов
- В целях маскировки пульпарного дна с изменившимся цветом в базисе препаровки (непрозрачные оттенки).

AELITE LS - КОМПОЗИТ ДЛЯ БОКОВЫХ ЗУБОВ С НИЗКОЙ УСАДКОЙ

AELITE LS для боковых зубов – это светоотверждаемый высоконаполненный (86% - 90% по весу) рентгеноконтрастный композит для боковых зубов с низкой усадкой. Благодаря высокому содержанию частиц наполнителя, AELITE LS чрезвычайно удобен для создания окклюзионных контуров и межпроксимальных контактов. Используя технику послойного нанесения, материал Aelite Aesthetic Enamel можно накладывать поверх AELITE LS для боковых зубов.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ AELITE LS ДЛЯ БОКОВЫХ ЗУБОВ:

- Реставрации I и II классов
- Надстраивание культи в целях замещения отсутствующих зубных структур

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Прежде чем изолировать и препарировать зуб, выберите необходимый тип и оттенок композита:
Aelite LS для боковых зубов: реставрации задних зубов I и II классов
Aelite All Purpose Body: универсальный композит для реставраций I и V классов
Aelite Aesthetic Enamel: эмалевый слой для реставраций I и V классов.
- Очистите препаровку суспензией пемзы с водой (или суспензией пемзы с дезинфицирующим средством, например, CAVITI CLEANSER). Промойте и высушите препаровку.
- Протравите препаровку протравкой, например, такой как UNI-ETCH% и следуйте инструкциям производителя:
 - Нанесите протравку с помощью прилагаемой игольчатой канюли.
 - Оставьте впитываться в течение 15 с.
 - Тщательно промойте (минимум 5 секунд), чтобы полностью удалить все следы протравки.
 - Для обеспечения оптимального результата, поверхности эмали или дентина не должны оставаться сухими в течение продолжительного периода времени.
 - Перед нанесением гидрофильного адгезива, обязательно увлажните эмаль и дентин увлажняющим веществом, например, AQUA-PREP.
- Нанесите адгезив, например ONE-STEP, ONE-STEP PLUS, ALL-bond Universal..., следуя инструкциям производителя.
- Поместите небольшое количество выстилки AELITE в полость препаровки для выстилки пульпарного дна, гингивального дна и аксиальных стенок. (ПРИМЕЧАНИЕ: удалите с краев излишки материала, если необходимо уделить внимание эстетике реставрации.) Полимеризуйте 40 секунд (500 мВт/см²)
- Распределите необходимое количество композита AELITE на светозащищенной пластинке для смешивания. (Совет: Чтобы предотвратить выделение из шприца избыточного количества материала, поверните ручку шприца по часовой стрелке сразу после нанесения материала.) В случае использования однодозовых наконечников вводите композит AELITE непосредственно в препаровку. ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за своих химических свойств, композит естественным образом будет прилипать к вашему инструменту. Чтобы предупредить это обстоятельство, была разработана специальная модернизирующая смола, способствующая более удобному размещению и контурированию композитов. Увлажняя инструмент, МОДЕЛИРУЮЩАЯ СМОЛА удобна при размещении и манипуляциях с композитом во всех ваших прямых реставрациях.
- В препаровку полости нанесите композит выбранных оттенков слоями 1-2 мм. Светоотверждайте каждый слой полимеризационной лампой. Удерживайте наконечник лампы максимально близко к поверхности композита, избегая контакта с ней. Продолжайте наращивать слои композита, пока не заполните препаровку полости до уровня краевого прилегания, а реставрация не примет желаемой формы. Каждую поверхность последнего слоя необходимо полимеризовать светом в течение периода времени, указанного в полимеризационной таблице.
- Проверьте окклюзию и финируйте. Чтобы улучшить целостность краевого прилегания, увеличить сопротивляемость износу и окрашиванию, после операции финирирования нанесите герметик поверхности, например, BisCover LV, FORTIFY, следуя инструкциям производителя.

Aelite All-Purpose Body Shade: A1	H-812A1P
Aelite All-Purpose Body Shade: A2	H-812A2P
Aelite All-Purpose Body Shade: A3	H-812A3P
Aelite All-Purpose Body Shade: A3.5	H-812A35P
Aelite All-Purpose Body Shade: B1	H-812B1P
Aelite All-Purpose Body Shade: C2	H-812C2P
Aelite All-Purpose Body Shade: D3	H-812D3P
Aelite All-Purpose Body Shade: Light Opaque A1-O	H-812A1OP
Aelite All-Purpose Body Shade: Dark Opaque A3.5-O	H-812A35OP
Aelite LS Posterior Shade: A1-PLS	H-721A1P
Aelite LS Posterior Shade: A2-PLS	H-721A2P
Aelite LS Posterior Shade: A3-PLS	H-721A3P
Aelite LS Posterior Shade: A3.5-PLS	H-721A35P
Aelite LS Posterior Shade: B1-PLS	H-721B1P
Aelite LS Posterior Shade: C2-PLS	H-721C2P
Aelite LS Posterior Shade: C4-PLS	H-721C4P
Aelite LS Posterior Shade: D3-PLS	H-721D3P

Aelite Aesthetic Enamel Shade: A1-E	H-852A1P
Aelite Aesthetic Enamel Shade: A2-E	H-852A2P
Aelite Aesthetic Enamel Shade: A3-E	H-852A3P
Aelite Aesthetic Enamel Shade: A3.5-E	H-852A35P
Aelite Aesthetic Enamel Shade: A4-E	H-852A4P
Aelite Aesthetic Enamel Shade: B1-E	H-852B1P
Aelite Aesthetic Enamel Shade: B2-E	H-852B2P
Aelite Aesthetic Enamel Shade: B3-E	H-852B3P
Aelite Aesthetic Enamel Shade: B4-E	H-852B4P
Aelite Aesthetic Enamel Shade: C1-E	H-852C1P
Aelite Aesthetic Enamel Shade: C2-E	H-852C2P
Aelite Aesthetic Enamel Shade: C3-E	H-852C3P
Aelite Aesthetic Enamel Shade: C4-E	H-852C4P
Aelite Aesthetic Enamel Shade: D2-E	H-852D2P
Aelite Aesthetic Enamel Shade: D3-E	H-852D3P
Aelite Aesthetic Enamel Shade: D4-E	H-852D4P
Aelite Aesthetic Enamel Shade: Bleach W-E	H-852W2P
Aelite Aesthetic Enamel Shade: Incisal Frost	H-852FRP
Aelite Aesthetic Enamel Shade: Incisal Clear	H-852CLP
Aelite Aesthetic Enamel Shade: Incisal Light Gray	H-852LGP

ХРАНЕНИЕ: Храните при комнатной температуре (20°C-25°C).

 BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193, U.S.A.
 1-847-534-6000
www.bisco.com

 ООО «Денко-Украина»
бул.Т.Шевченко,1 оф.8
Киев, 01004, Украина
 (067) 506-51-65
www.denco.com.ua