

Aeliteflo

низькомодульний мікрогібридний композит

ÆLITEFLO — це світлотвердіючий, високо наповнений мікрогібридний композит із низьким модулем пружності. Незважаючи на те, що ÆLITEFLO є текучим матеріалом, його властивості запобігають сповзанню, що забезпечує кращий контроль у важкодоступних ділянках. Завдяки спеціальним насадкам ÆLITEFLO легко вводиться безпосередньо в підготовлену порожнину. Модуль пружності дентину становить приблизно 18 ГПа, тоді як у ÆLITEFLO — менше 6 ГПа, що надає йому більш еластичних характеристик. Ця еластичність сприяє кращій ретенції (утриманню матеріалу). Це особливо важливо при реставрації зубів пацієнта з численними абфракційними ураженнями, де жорсткий композит із високим наповненням може врешті-решт зазнати невдачі.

Показання до застосування:

1. Клас V
2. Клас III
3. Реставрації ямок на щічній поверхні
4. Невеликі реставрації класу IV, що не піддаються навантаженню
5. Фіксація фарфорових вінірів
6. Профілактична смола для дорослих
7. Шинування — фіксація зуба до зуба
8. Невелике нарощування кукси
9. Ремонт крайових дефектів
10. Реставрації класу I або II у тимчасових (молочних) зубах

Другорядні показання:

1. Підкладка в порожнині (клас I або II)
2. Герметизація фісур і ямок

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ:

1. Перед ізоляцією виберіть відповідний відтінок композиту ÆLITEFLO.
2. Зніміть ковпачок із вибраного шприца та надійно приєднайте голчасту насадку.
3. Переконайтеся, що порожнина ретельно очищена відповідно до інструкцій із використання вибраної адгезивної системи.
4. Нанесіть адгезив згідно з інструкціями виробника.
5. Використовуючи раніше обраний відтінок, вносіть композит у порожнину шарами товщиною 1–2 мм. Для відтінку ****Opaque White**** наносіть шари товщиною 1 мм.
6. Полімеризуйте кожен шар світлом протягом 20 секунд. Продовжуйте пошарове внесення матеріалу, доки порожнина не буде заповнена до рівня краю кавітації.
7. Виконайте фінішну обробку та полірування.

Попередження: • Уникайте потрапляння в очі. Якщо матеріал потрапив в очі, промийте великою кількістю води та зверніться до лікаря. • У разі контакту з іншими тканинами, негайно промийте їх великою кількістю води протягом декількох хвилин. • Легкозаймистий.

Запобіжні заходи: • Перехресне забруднення: продукт може містити елементи, призначені лише для одноразового використання. Утилізуйте використані або забруднені одноразові компоненти та аксесуари. Не очищуйте, не дезінфікуйте й не використовуйте повторно..

Якщо матеріал зберігався в холодильнику, перед використанням дайте йому нагрітися до кімнатної температури. Перевіряйте етикетки окремих компонентів на наявність терміну придатності. • Перед використанням ознайомтеся з інструкцією щодо зберігання продукту. • Уникайте контакту зі шкірою; незатверділі (мет)акрилатні смоли можуть викликати сенсibiлізацію у чутливих осіб. У разі контакту — змийте милом і водою.

• Пацієнт та стоматологічний персонал повинні користуватися захисними окулярами.

ЗБЕРІГАННЯ:

Зберігати при кімнатній температурі (20°C - 25°C).

ТОВ "ДЕНКО ПРО"

(067)-506-51-65

www.denco.com.ua