

CORE-FLO DC Lite

надстроечный композит для формирования культи



CORE-FLO DC Lite является рентгеноконтрастным текучим материалом двойного отверждения, содержащий ионы фтора, специально созданным для цементирования штифтов и создания надстройки (культи) в одновременной простой аппликации.

CORE-FLO DC Lite также является и материалом для замещения дентина.

Выпускается в двойном автосмесительном шприце, в Натуральном/A1 и Опаковом оттенках.

Предназначен для использования с адгезивами, совместимыми с материалами двойного отверждения (как адгезивы Биско.)

Основными предназначениями использования CORE-FLO DC Lite являются:

1. Материал для создания культи
2. Цементировка штифтов
3. Материал для замещения дентина

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ПРОЦЕДУРЫ ЗАМЕШИВАНИЯ КУЛЬТЕВОГО МАТЕРИАЛА:

1. Удалите крышку шприца или смесительного кончика двойного шприца.
2. Выдавите небольшое количество материала на смесительную подкладку, чтобы устранить пустоты в каждой из камер двойного шприца.
3. Присоедините смесительный кончик двойного шприца, сопоставив направляющий ключ и паз. Подсоедините смесительный тип к двойному шприцу и поверните коричневый соединяющий механизм по часовой стрелке.
4. При нажатии поршня будет происходить смешивание и выдавливание CORE-FLO DC Lite. (Обратитесь к отделу «Техническая Информация» для уточнения рабочего времени времени схватывания.)

1. CORE BUILD-UP, ИСПОЛЬЗУЯ CORE-FLO DC

1. Изолируйте зуб резиновой заслонкой.
2. Нанесите адгезив в соответствии с указаниями производителя; мы рекомендуем воспользоваться любым адгезивом BISCO.
3. а. Если вы пользуетесь матричной пластинкой, расположите её вокруг препарированного зуба. Поместите внутриротовой кончик непосредственно на препаровку и CORE-FLO DC Lite. Свето-отверждайте 40 секунд. б. Если вы используете культевую форму, поместите смесительный кончик непосредственно в форму и выдавите CORE-FLO DC Lite. Поместите заполненную культевую форму на препарированный зуб и удерживайте её, свето-полимеризуйте 40 сек.
4. Обработайте и отделайте культуру обычным способом, пользуясь алмазными и карбидными борами.

2. ЦЕМЕНТАЦИЯ ШТИФТА И СОЗДАНИЕ КУЛЬТЕВОЙ НАДСТРОЙКИ, ИСПОЛЬЗУЯ CORE BUILD-UP, ПРИМЕНЯЯ CORE-FLO DC Lite

1. Изолируйте и препарируйте зуб в соответствии с указаниями производителя штифта.
2. Нанесите адгезив в соответствии с инструкциями производителя. Мы рекомендуем применить любого адгезива BISCO. До свето-полимеризации промокните канал насухобумажными турундами пока они не выйдут из канала сухими, затем мягко просушите канал воздушной струей, чтобы испарить растворитель.

▲ **ПРИМЕЧАНИЕ:** *Использование бумажной турунды является важным этапом для удаления скоплений адгезива, чтобы не препятствий для полной установки штифта.*

3. Нанесите слой адгезива на поверхность штифта в соответствии с указаниями производителя. Это повысит смачиваемость поверхности штифта.
4. Пользуясь смесительным кончиком для корневых каналов введите CORE-FLO DC Lite в канал. Начните с апикального отдела канала и медленно выводите кончик, оставляя кончик в цементе,

чтобы уменьшить воздушные поры.

5. Нанесите CORE-FLO DC Lite на апикальный участок штифта. Мягко установите штифт в канал и поддерживайте давление 20-30 сек. пока штифт не установится на место.
6. Продолжите выдавливать CORE-FLO DC Lite вокруг штифта и надстройте культю дожелательной высоты и формы.
7. Удалите избытки материала и свето-отверждайте 40 сек., разместив кончик световода как можно ближе к штифту и надстройке.
8. Закончите и отделайте культю, в обычной манере, алмазными и карбидными борами.

3. МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДЕНТИНА

1. Изолируйте зуб и препарируйте в консервативной манере. Сполосните и подсушите.
2. Нанесите адгезив в соответствии с инструкциями производителя; мы рекомендуем любой адгезив от BISCO.
3. Выдавите CORE-FLO DC Lite только до уровня дентино-эмалевой границы.
4. Свето-отвердите CORE-FLO DC Lite 10 сек. Продолжайте плотно паковать свето-отверждаемый композит, постепенно, до заполнения препаровки. Свето-отвердите в соответствии с инструкциями производителя.
5. Поверьте окклюзию и продолжайте с обработкой и полировкой.

Предостережение:

- Загрязнения слюной, кровью или водой во время этих процедур следует избегать.

Загрязнение при использовании зубных адгезивов будет нарушать дентинный бондинг и может способствовать уменьшению долговечности реставраций.

- Во всех случаях, где загрязнение возможно, рекомендуется использовать коффердам.

Предосторожность:

- Перекрёстное загрязнение: Продукт может содержать элементы, предназначенные для одноразового использования. Избавьтесь от загрязнённых элементов. Не очищайте их, не дезинфицируйте и не используйте снова.

Меры предосторожности:

- Избегать контакта с кожей. Неполимеризованная (метил)акрилатная смола может вызвать раздражение у людей с чувствительной кожей. В случае контакта, промойте кожу водой с мылом.
- Во избежание полимеризации или закупорки, смесительный кончик следует оставить на месте до следующего использования. Рекомендуется избегать любого загрязнения шприцев в процессе лечения. При их внутриворотном использовании, оботрите их смесительные кончики дезинфектором до хранения.
- В отличие от адгезивов BISCO, не все однобутылочные адгезивы для полной протравки или само-протравливающие системы связываются с само-полимеризуемыми или двойного отверждения материалами. Справьтесь с инструкцией производителя
- Изолируйте культю перед снятием слепка для изготовления временной коронки мостовидного протеза (возможно, что достаточно будет тщательно смочить культю), для того, чтобы предупредить бондинг с этими материалами
- Если материал хранился в холодильнике, он должен достигнуть комнатной температуры до его использования.

Техническая информация:

Хранить при комнатной температуре (20°C - 25°C):

Рабочее время: Минимум 1 минута

Время схватывания: Максимум 7 минут

Рабочее время и время схватывания могут варьировать в зависимости от условий хранения, температуры, влажности и т.д.

Каталожный номер:

Core-Flo DC Lite Shade: Natural/A1 A-17801P

Core-Flo DC Lite Shade: Opaque White A-17803P

 BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193, U.S.A.
 1-847-534-6000
www.bisco.com

 ООО «Денко-Украина»
бул.Т.Шевченко,1 оф.8
Киев, 01004, Украина
 (067) 506-51-65
www.denco.com.ua