

FORTIFY

композитний герметик для поверхні

FORTIFY - це світлотверднуча, низьков'язка, незаповнена смола.

FORTIFY призначений для використання як герметик для композитних поверхонь. Контуринг і фінішна обробка задніх композитних реставрацій за допомогою ротаційних інструментів можуть створювати мікротріщини та нерівності поверхні, що сприяють зносу композиту протягом перших шести місяців функціонування.

FORTIFY - це герметик для поверхні, який виготовлений з незаповненої смоли. Композитна поверхня, запечатана FORTIFY, має покращену зносостійкість і довготривалу маргінальну цілісність. FORTIFY ефективний з усіма передніми/задніми композитами (на основі смоли Bis-GMA або UDMA), що призводить до покращених властивостей зносу. Завдяки унікальній формулі, FORTIFY можна значно розріджувати повітрям, а потім світлотвердити, не заважаючи оклюзії.

Основне призначення FORTIFY - проникати та герметизувати поверхню:

1. Прямих композитних реставрацій
2. Непрямих композитних реставрацій
3. Тимчасових реставрацій
4. Амальгамових реставрацій

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ:

1. **Для нових реставрацій:** Після корекції, фінішної обробки та полірування остаточної реставрації, промийте зуб і реставрацію великою кількістю води, щоб видалити всі залишки. **АБО**
Для раніше встановлених реставрацій: Очистіть всю поверхню сумішшю пемзи та води.
2. Травіть поверхню реставрації та приблизно 1-2 мм за межами краю зуба/реставрації, використовуючи травильний агент відповідно до інструкцій виробника. Для повного покриття реставрацій травіть всю поверхню реставрації.
3. Промийте великою кількістю води та ретельно висушіть зуб і реставрацію повітрям.
4. Нанесіть невелику кількість герметика FORTIFY у змішувальну ємність. Нанесіть тонкий шар на попередньо протравлені поверхні, використовуючи рухи, що втирають. Розріджуйте повітрям, обдуваючи цей шар легким струменем повітря, щоб забезпечити рівномірний розподіл.
5. Світлотвердніть герметик протягом 10 секунд. Перевірте оклюзію.

Попередження: Уникайте потрапляння в очі. Якщо продукт потрапив в очі, промийте великою кількістю води та зверніться за медичною допомогою.

Застереження: Перехресне забруднення: Продукт може містити елементи, призначені для одноразового використання. Утилізуйте використані або забруднені компоненти та аксесуари одноразового використання. Не очищуйте, не дезінфікуйте та не використовуйте повторно.

Запобіжні заходи: Неполімеризовані смоли можуть викликати сенсibiliзацію шкіри у чутливих осіб. Уникайте контакту зі шкірою. У разі контакту зі шкірою ретельно промийте водою з милом.

ЗБЕРІГАННЯ:

Зберігати при кімнатній температурі (20°C - 25°C).

ТОВ "ДЕНКО ПРО"

(067)-506-51-65

www.denco.com.ua