

Porcelain Etchant 9,5%

протравка для порцеляни

Протравка для порцеляни (фарфору), PORCELAIN ETCHANT 9,5% компанії Visco ефективно покращує адгезивне зчеплення, хімічно збільшуючи площу поверхні фарфору, яка підлягає зчепленню. Ефект подібний до мікроструминного очищення (піскоструминного), але більш керований та ефективний.

PORCELAIN ETCHANT 9,5% мікроскопічно рифлює будь-яку фарфорову або скляну поверхню. Необхідно прийняти заходи, щоб уникнути контакту з лакованими поверхнями, оскільки ці поверхні втратять свій блиск.

УВАГА: PORCELAIN ETCHANT 9,5% безпечний та ефективний при використанні згідно інструкцій. Не використовуйте цей продукт, поки ви не прочитали цей документ докладно.

Показання до застосування:

1. Цементування фарфорових реставрацій.
2. Відновлення (ремонт) фарфорових реставрацій.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ:

1. Протравка керамічних конструкцій перед цементуванням.

1. Лікарю та асистенту необхідно надіти захисні окуляри та перчатки.
2. Якщо в лабораторії передбачено попереднє протравлення конструкції:
 - видаліть захисний ковпачок з шприца, обережно надіньте насадку на шприц та перевірте протікання;
 - нанесіть протравку на суху керамічну поверхню на 90 секунд;
 - не допускайте контакту протравки з глянцевиими поверхнями, інакше поверхні можуть втратити блиск.
3. Змийте протравку великою кількістю води та висушіть поверхню повітрям. Протравлена поверхня може виглядати тьмяною та сірого кольору. Якщо фарфор має білий меловий вигляд - видаліть сіль та забруднення, які залишилися після протравлення, ретельно промийте та просушіть.
4. На протравлену внутрішню поверхню реставрації нанесіть 1-2 тонкі шари силанового праймера відповідно до інструкції виробника. Висушіть повітряним пістолетом.
5. Дотримуючись інструкцій виробника, нанесіть адгезив та продовжуйте цементування.

2. Ремонт керамічних реставрацій.

1. Лікарю та асистенту необхідно надіти захисні окуляри та рукавички.
2. На поверхні пошкодження видаліть кераміку та створіть шорсткість поверхні (під кутом 45 градусів). (Видаліть старий композит, що залишився від попередніх пошкоджень.)
3. За допомогою ковердаму ізолюйте ділянку, яку потрібно протравити. На ділянці, де протравлювання небажане, рекомендується нанести захисний гель (BARRIER GEL Visco*).
4. Зніміть захисний колпачок з шприцу, обережно надіть насадку на шприц та перевірте протікання. Нанесіть протравку на суху керамічну поверхню протягом 90 секунд. Використовуйте насадку відсмоктувача, щоб видалити протравку. Промийте місце протравлення великою кількістю води, потім висушіть повітрям. Протравлена поверхня може виглядати тьмяною та шорсткою.

5. Нанесіть 1-2 тонкі шари силанового праймера на протравлену поверхню реставрації протягом 30 секунд. Висушіть повітрям.
6. Нанесіть адгезив відповідно до інструкції виробника. Завершіть ремонт композитом та відполіруйте реставрацію.

Заходи безпеки:

- Не використовуйте, доки не уважно ознайомитесь та не засвоїться вказані нижче правила використання.
- Плавикова кислота - дуже сильна та агресивна хімічна речовина. Спричиняє значне подразнення слизової оболонки очей та шкіри. У разі випадкового потрапляння в очі необхідно ретельно промити великою кількістю води протягом 15 хвилин та негайно звернутися до лікаря.
- Плавикова кислота виділяє пари, які можуть спричинити подразнення дихальних шляхів. Регулярне вдихання цих парів є небезпечним та може мати небажані наслідки.
- При використанні необхідно дотримуватися підвищених заходів безпеки, щоб захистити пацієнта, себе та асистента.
- Обов'язкове використання захисних окулярів (пацієнт, лікар, асистент).
- Лікар і асистент обов'язково повинні використовувати захисні рукавиці.
- Якщо ремонт фарфору виконується в ротовій порожнині, необхідно обов'язкове використання коффердаму.
- Не використовуйте для протравлювання емалі або дентину.
- При потрапленні PORCELAIN ETCHANT на шкіру, негайно промийте місце контакту великою кількістю води протягом кількох хвилин. У разі контакту протравки зі шкірою або слизовою оболонкою будь-якого проміжку часу можливе ушкодження ділянок контакту.
- Перед внесенням до ротової порожнини переконайтеся, що насадка шприца правильно і міцно закріплена, перевірте текучість протравки. Якщо присутній опір, змініть насадку і перевірте ще раз.
- Використовуйте тільки рекомендовані виробником насадки.
- Не допускайте проковтування протравки пацієнтом.

Увага:

- Не перетравлюйте конструкції, які раніше були протравлені в вашій лабораторії; Надмірна протравлювання може призвести до зменшення міцності зв'язки або пошкодження фарфору.
- При використанні протравки не допускайте її потрапляння на глянцевої поверхні фарфору. Ці поверхні втратять свій блиск.

Попередження:

- Вторинне забруднення: насадки для шприца призначені для одноразового використання. Негайно утилізуйте використані або забруднені компоненти.
- Заборонено очищувати, дезинфікувати або повторно використовувати.

ЗБЕРІГАННЯ: Зберігайте при кімнатній температурі (22°C).

ТОВ «ДЕНКО ПРО»
067-506-51-65
www.denco.com.ua