


UNI-ETCH 32%

Полугелевая протравка.

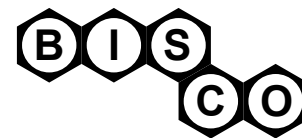

Полугелевая протравка Visco содержит фосфорную кислоту (H₃PO₄) и полимерный загуститель и предназначена для использования на эмали и дентине. Данная протравка эффективно удаляет смазанный слой, протравливает и деминерализует эмаль и дентин, обеспечивая поверхность необходимой микроретенцией для прочного бондинга. Специально разработанная (запатентованная) полугелевая протравка не оставляет кремниевых частиц.

Данные ПРОТРАВКИ можно применять самостоятельно или в сочетании с другими препаратами. Полимерный загуститель создает тиксотропные свойства, облегчающие процедуру работы с материалом. Протравка легко и быстро смывается, не оставляя каких-либо следов. Опубликованные исследования подтвердили, что ПРОТРАВКИ Visco обеспечивают более высокую силу бондинга с дентином (влажным или сухим) и эмалью.

ПРОТРАВКА Visco производится с содержанием хлорида бензалкония (BAC), противомикробного вещества. Исследования подтверждают развитие зон (до 7 мм) защищенных от остаточных бактерий, в случае со Streptococcus Mutans и Actinomyces Viscosus2.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Изолируйте зуб и подготовьте полость обычным способом. Полностью очистите поверхность жидкой пемзой с водой.
2. Нанесите протравку с помощью НАКОНЕЧНИКА EZ-DOZE, шприца с одноразовым наконечником или щетки с одноразовым наконечником. Протравливайте 15 сек. Время протравливания необходимо контролировать с помощью секундомера. Засекайте время после нанесения препарата. **Аналогия: нанесите протравку сначала на эмаль, а затем на дентин, чтобы увеличить время протравливания эмали.**
3. Тщательно промойте (минимум 5 сек) область нанесения, полностью удалив все следы протравки.
4. Для достижения оптимального результата, не высушивайте эмаль или дентин в течение длительного времени. Перед нанесением гидрофильных адгезивных смол, например, ALL-BOND 2 или ONE-STEP, сразу же еще раз увлажните эмаль и дентин увлажняющим веществом, например, AQUA-PREP F.

Меры предосторожности:

Фосфорная кислота вызывает сильное раздражение кожи и глаз. В случае попадания, тщательно промойте глаза водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью. В случае попадания материала на кожу, тщательно промойте место контакта мылом и водой. В случае длительного контакта протравки с кожей, возможно повреждение участков контакта.



Хранить при комнатной температуре (22°C)



Uni-Etch w/BAC Kit: 1 Uni-Etch w/BAC Syringe (30ml),
30 Disposable Syringes, 30 Disposable Tips E-56620K

1 Bulk Bottle Uni-Etch w/BAC (30g) E-5637EB

4 Syringes Uni-Etch w/BAC (5g ea.),
60 Disposable Syringe Tips E-5502EBM

1 Uni-Etch w/BAC Bulk Syringe (30ml) E-56621P

 BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193, U.S.A.
 1-847-534-6000
www.bisco.com

 ООО «Денко-Украина»
бул.Т.Шевченко,1 оф.8
Киев, 01004, Украина
 (067) 506-51-65
www.denco.com.ua