

Z-PRIME Plus

праймер для цирконію, алюмінію та металу

Z-PRIME Plus - це однокомпонентний праймер, який використовується для покращення адгезії між непрямыми реставраційними матеріалами та композитними цементами.

Завдяки своєму унікальному хімічному складу він може використовуватися для обробки поверхні цирконієвої та оксидно-алюмінієвої металокераміки, а також інших типів металів/сплавів, композитів та ендодонтичних штифтів.

Z-PRIME Plus був спеціально розроблений для забезпечення високої міцності з'єднання в будь-якому режимі полімеризації.

Z-PRIME Plus призначений для поверхневої обробки для наступних реставрацій:

1. Цирконій
2. Алюміній
3. Метал/сплав
4. Композит
5. Ендодонтичний штифт
6. Внутрішньоротові ремонти

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ:

Підготовка до реставрації.

Реставрації з цирконію/оксиду алюмінію, реставрації з металу/сплаву (включаючи порцеляну, наплавлену на метал), непрямі композитні реставрації, ендодонтичні штифтові реставрації:

- ✓ *Переконайтеся, що реставрація була правильно оброблена піскоструминним апаратом або виконайте піскоструминну обробку реставрації згідно з інструкціями виробника. Обробку абразивним матеріалом необхідно виконати перед нанесенням Z-Prime Plus.*
1. Нанесіть 1-2 тонких шари Z-PRIME Plus™ на внутрішню частину реставрації.
Зачекайте 30 секунд і просушіть повітрям.
 - ✓ *Заґрунтована поверхня диоксиду цирконію буде виглядати однаково до і після застосування праймера.*
 2. Перед тим, як остаточно зафіксувати реставрацію, приміряйте її на препарований зуб, щоб переконатися в правильності посадки.
 3. Ретельно промийте реставрацію водою і просушіть безмасляним повітрям.
 - ✓ *Якщо поверхня не була попередньо оброблена Z-PRIME Plus™, очистіть поверхню очищувальним засобом (наприклад, ZirClean®). Промийте струменевою водою та просушіть стисненим повітрям без масла. Потім виконайте крок 1.*
 4. Здійсніть цементацию, використовуючи фіксуючий цемент (наприклад, Duo-Link Universal™ або BisCem®).

Для внутрішньоротових ремонтів

- ✓ Перед внутрішньоротовим ремонтом ретельно ізолюйте робочу ділянку.

Ремонт реставрацій з цирконію/алюмінію або металу:

1. Зробіть поверхню шорсткою за допомогою піскоструминної обробки або алмазного бору. Промийте та просушіть повітрям.
2. Нанести 1-2 шари Z-PRIME Plus. Просушіть повітряним шприцом протягом 3-5 секунд.
3. Завершіть ремонт, використовуючи композитний матеріал (наприклад, AELITE™*). Виконайте фінальну обробку відповідно до інструкцій виробника.

Ремонт реставрацій із порцеляни, напавленої на цирконій/оксид алюмінію/метал:

1. За необхідності скосить порцеляну.
2. Зашорстіть металеву поверхню за допомогою піскоструминної обробки або алмазного бору.
3. Протравіть порцелянову поверхню плавиковою кислотою (наприклад, 9,5% PORCELAIN ETCHANT) відповідно до інструкцій виробника.
4. Нанесіть 1-2 шари силану (наприклад, BIS-SILANE або PORCELAIN PRIMER) на порцеляну відповідно до інструкцій виробника та висушіть повітряним шприцом, щоб випарувати розчинник.
5. Нанести 1-2 шари Z-PRIME Plus на відкриті ділянки цирконію/оксиду алюмінію/металу та просушити повітряним шприцом протягом 3-5 секунд.
6. За бажанням, нанести на відкритий метал 1-2 шари непрозорого матеріалу (наприклад, DUAL-CURED OPAQUER від Bisco), згідно з інструкцією виробника.
7. Завершити ремонт, використовуючи композитний матеріал (наприклад, AELITE), та виконати фінішну обробку згідно з інструкцією виробника.

Ремонт композитних реставрацій:

1. Сформувати скос на краї.
2. Зробіть поверхню шорсткою за допомогою піскоструминної обробки або алмазного бору. Промийте та просушіть повітрям.
3. Нанести 1-2 шари Z-PRIME Plus. Просушіть повітряним шприцом протягом 3-5 секунд.
4. Завершіть ремонт, використовуючи композитний матеріал (наприклад, AELITE™*). Виконайте фінальну обробку відповідно до інструкцій виробника.

Важливо:

- ✓ Легкозаймистий.
- ✓ Перехресне забруднення: продукт може містити компоненти, призначені для одноразового використання. Утилізуйте використані або забруднені приладдя. Не намагайтеся їх очистити, дезінфікувати або повторно використовувати.
- ✓ Z-PRIME Plus є світлочутливим матеріалом. Використовуйте Z-PRIME Plus негайно як тільки він буде розподілений у змішувальній ємності, або захистіть його від навколишнього світла.
- ✓ Для внутрішньоротової реставрації належним чином ізолюйте реставраційну ділянку гумовою прокладкою.
- ✓ Уникайте контакту зі шкірою; не полімеризовані (мет)акрилатні смоли можуть викликати сенсibiлізацію шкіри у сприйнятливих осіб. У разі контакту промити шкіру водою з милом.
- ✓ Пацієнт та стоматологічний персонал повинні носити захисні окуляри.

ЗБЕРІГАННЯ:

Зберігайте при кімнатній температурі (2-25°C).

ТОВ «ДЕНКО ПРО»

(067)-506-51-65

www.denco.com.ua